

Abyste mohli správně využít všech předností tohoto teploměru, důkladně prostudujte návod k použití.

Bezpečnostní pokyny: teploměr nenechte spadnout na zem. Není odolný vůči nárazu a úderu. Chraňte přístroj před vysokými teplotami a slunečním zářením. Teploměr neohýbejte. K čištění používejte výhradně vodu nebo běžné dezinfekční prostředky.

Uvedení do provozu:

Teploměr uvedeme do provozu stisknutím tlačítka umístěného vedle displeje. Krátký zvukový signál udá, že přístroj je zapnut. Současně je prováděn tzv. LCD test. Symbol „°C“ začne blikat, když teploměr začne měřit. Je-li naměřená teplota nižší než 32°C objeví se na display „Lo“, probíhá měření. V průběhu měření je zobrazována aktuální teplota. Během této doby stále bliká „°C“. Zazní-li zvukový signál a symbol „°C“ již neblíká, znamená to, vzrůst teploty v průběhu 16 sekund je menší než 0,1 °C. Měření je nyní ukončeno.

Na display je zobrazena nejvyšší naměřená hodnota, a to až do vypnutí teploměru. Teploměr vypněte krátkým stiskem obslužného tlačítka. Jinak se teploměr po 10 minutách klidu vypne sám.

Vyvolání naměřených hodnot z paměti: Zapnutím teploměru se na 1 sekundu zobrazí poslední naměřená hodnota.

Funkční test:

Při každém zapnutí přístroje dojde ke kontrole jeho funkcí. Objeví-li se symbol „ERR“, nastala porucha.

Metody měření:

V ústech (orální): vložte teploměr ke kořenu jazyka, senzor měření přitom musí být v pevném kontaktu s tkání. Zavřete ústa a dýchejte nosem. Doba měření je 60 sec. Pro porovnání s teplotou v podpaží odečteme 0,3 °C.

V konečníku (rektální): jde o nejspolehlivější metodu měření teploty vhodnou zejména pro děti. Zaveďte špičku teploměru cca 2 – 3 cm do análního otvoru po dobu nejméně 60 sec. Pro porovnání s teplotou v podpaží odečteme 0,5°C.

V podpaží (axilární): tato metoda není z lékařského hlediska přesná. Doba měření je min. 5 minut!

Měření bazální teploty (vaginální): teploměr je dále vhodným přístrojem k určování plodných a neplodných dnů díky dvěma desetinným místům je možné sledovat bazální teplotní změny.

Změna °C/°F: Stisknete tlačítko na 4 sekundy, dojde ke změně měřicí jednotky.

Údržba a dezinfekce: Teploměr není vodotěsný, neponořujte ho do vody nebo jiných kapalin.. **Upozornění:** ostatní prostředky, ředidla a jiné metody čištění mohou způsobit poškození teploměru. **Teploměr nevyvážejte!**

Technické údaje: typ: maximální teploměr. Rozsah měření: +32,00°C až +42,99°C. Nižší teplota než 32,00°C je označena „L“. Teplota vyšší než 42,99°C je označena „H“.

Přesnost měření: ± 0,1°C v rozmezí +35,5°C až +42°C, mimo tento rozsah ± 0,2 °C
Automaticky testuje hodnotu 37,0°C, při odchylce vyšší než 0,1°C display indikuje symbol „ERR“.

Displej: čtyřmístný ukazatel z tekutých krystalů (LCD) s nejmenší jednotkou 0,01°C.

Skladovací teplota: -25°C až +55°C

Kontrola baterie: typ SR 41. 1,55V. Provozní doba 200 hodin (cca 3 000 měření).

Blikající symbol ▼ signalizuje pokles napětí pod 1,435 V a upozorňuje na nutnost výměny baterie.

Výrobek a baterie likvidujte odevzdáním na místo zpětného odběru. Výrobek ani baterie nepatří do běžného domovního odpadu! Papír odevzdejte na sběrné místo. Děkujeme, že šetříte přírodu. ☺

Záruční podmínky:

Záruka je 24 měsíců ode dne zakoupení přístroje. V případě poruchy zašlete přístroj svému prodejci. Záruka se nevztahuje na škody způsobené nevhodnou manipulací či použitím výrobku.

Záruční podmínky vznikají pouze na poruchy vzniklé v záruční době. Technické změny vyhrazeny!



Rossmax Swiss GmbH, Tramstrasse 16, CH-9442 Berneck, Switzerland

Distributor pro ČR a SR: BONECO CR, s.r.o., Na Podhoří 185, 588 13 Polná, tel: 774 162 396
www.boneco-cr.cz, www.rossmax.cz



Datum prodeje:

Razítko prodejce: