

Bezpečnostní pokyny: Veterinární teploměr nenechte upadnout na zem. Není odolný vůči nárazu a úderu. Chraňte přístroj před vysokými teplotami a slunečním zářením. Teploměr neohýbejte. K čištění používejte 70% alkohol Izopropyl nebo běžné dezinfekční prostředky. Tento teploměr je vodotěsný a je určen pouze pro zvířata.

Uvedení do provozu: Přístroj uvedeme do provozu stiskem tlačítka. Krátký zvukový signál udá, že přístroj je zapnut. Současně je prováděn tzv. LCD-test. Symbol „°C“ začne blikat, když teploměr začne měřit. Je-li naměřená teplota nižší než 32°C objeví se na displeji symbol „---“, probíhá měření. V průběhu měření je zobrazována aktuální teplota. Během této doby stále bliká „°C“. Zazní-li signální tón a „°C“ již neblíká, znamená to, že vzrůst teploty v průběhu 8 sekund je menší než 0,1°C. Měření je nyní ukončeno. Na displeji je zobrazena nejvyšší naměřená hodnota, a to až do vypnutí teploměru. Teploměr vypnete krátkým stiskem obslužného tlačítka, teploměr provede test a po asi 4 sekundách se vypne. Jinak se teploměr po 10 minutách vypne sám.

Funkční test: Při každém zapnutí přístroje dojde ke kontrole jeho funkcí. Objeví-li se symbol „ERR“, nastala porucha.

Vyvolání naměřených hodnot z paměti: u vypnutého přístroje přidržíte spínač cca 3 sec., pak dojde k zobrazení poslední maximální naměřené hodnoty. Tento údaj zmizí po dalších 3 sekundách a teploměr je připraven k dalšímu měření.

Metody měření:

V konečníku (rektální): jde o nejspolehlivější metodu měření teploty. Zaveďte špičku teploměru cca 2 - 3 cm do análního otvoru. Po cca 10 sec. by teplota měla být změněna.

Rozsah normálních teplot:

Kočka: 38,0 – 39,5°C

Pes: 37,5 – 39,0°C

Kůň: 37,5 – 38,5°C

Prase: 38,0 – 39,5°C

Kráva: 37,5 – 39,0°C

Čištění a dezinfekce: Teploměr je vodotěsný, smí být při čištění ponořen do vody, či běžného dezinfekčního prostředku. Teploměr by se měl čistit převážně 70% Izopropylovým alkoholem ve kterém nesmí být namočen déle než 24 hodin.

Upozornění: Při dlouhodobém namáčení nebo ponoření může dojít ke znehodnocení teploměru.

Technické údaje: Typ: Maximální teploměr.

Rozsah měření: 32,0°C až 42,9°C teplota nižší než 32,0°C je označena na displeji „---“ nebo „L“

Teplota vyšší než 42,9°C je označena symbolem „H“.

Přesnost měření: ± 0,1°C v rozmezí 34°C až 42°C.

Automaticky testuje hodnotu 37,0°C, při odchylce vyšší než 0,1°C display indikuje symbol „ERR“.

Displej: Trímístný ukazatel z tekutých krystalů (LCD) s nejmenší jednotkou 0,1°C.

Baterie: Typ: SR 41 1,55V. Provozní doba 140 hod. (cca 2000 měření).

Kontrola baterie: blikající symbol  signalizuje pokles napětí pod 1,435 V a upozorňuje na výměnu baterie. Výrobek a baterie likvidujte odevzdáním na místo zpětného odběru. Výrobek ani baterie nepatří do běžného domovního odpadu! Papír odevzdejte na sběrné místo.

Záruční podmínky:

Záruka je 24 měsíců ode dne zakoupení přístroje. Výrobek byl ve výrobním závodě pečlivě testován. V případě poruchy zašlete teploměr svému prodejci. Záruka se nevztahuje na škody způsobené nevhodnou manipulací či použitím výrobku.

Záruční podmínky vznikají pouze na poruchy vzniklé v záruční době.

BONECO CR, s. r. o., tel./fax: 567 212 396

e-mail: prodej@microlife.cz

www.microlife.cz

Výhradní dovozce pro Českou Republiku.

Datum koupě:

Razítko prodejce:

